

 <p>Groene Hart Ziekenhuis Open voor iedereen</p> <p>Medische Microbiologie</p>	<p>Bijlage</p> <p>Verzenden van diagnostische monsters per post</p>	<p>Versie: 2.0</p>
--	--	--------------------

Benodigde materialen

De verzending van een diagnostisch monster per post vindt plaats met een witte verzendetui. Hierin zit:

- vochtabsorberend papier
- transpostblisters; er zijn verschillende vormen voor verschillende soorten afnamemateriaal
- Safety Bag
- Adreskaartje
- Tyrip

Werkwijze

Stap 1

Afnamemateriaal (wattenstok in verzendmedium, dipslide, sputumpotje etc.) goed sluiten. Dit omwickelen met voldoende vochtabsorberend papier. Zorg dat het dopje mee wordt ingewikkeld.

Stap 2

Afnamemateriaal met vochtabsorberend papier plaatsen in de transportblisters. Transportblisters goed sluiten.

Stap 3

Transpostblisters met inhoud plaatsen in de vloeistofdichte Safety Bag. Witte afdekstrip van de Safety Bag verwijderen en voor- en achterzijde goed aandrukken.

Stap 4

Safety Bag plaatsen in de witte verzendetui.

Adreskaartje omdraaien zodat het adres van de afdeling Medische Microbiologie achter het venster zichtbaar wordt.

De etui met de ritssluiting sluiten. De verzendetui verzegelen met de tyrip.

De etui kan met de normale brievenpost verzonden worden.